

Instrukcja obsługi:

Przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem maski ochronnej.

Skuteczna ochrona jest zapewniona tylko wtedy, gdy przestrzegane są zalecenia producenta dotyczące sposobu użytkowania półmaski.

Filtracja:

Półmaska przeznaczona jest do indywidualnej ochrony dróg oddechowych chroniąc przed zanieczyszczeniami takimi jak kurz, dym, mgła.

FFP1 - nominalny współczynnik 4 MPC dla ochrony dróg oddechowych przed pyłami mineralnymi, organicznymi i syntetycznymi.

FFP2 - nominalny współczynnik 12 MPC dla ochrony dróg oddechowych przed oparami i mgiełką substancji organicznych.

FFP3 - nominalny współczynnik 50 MPC do ochrony układu oddechowego przed rakotwórczymi aerozolami, radionuklidami, drobnoustrojami, gruźlicą oraz innymi wirusami i mikroorganizmami.

Użytkowanie:

Otwórz opakowanie czystymi rękami, sprawdź czy produkt nie posiada uszkodzeń. Półmaskę załóż na podbródek, blaszką nosową do góry i przełóż taśmy przez głowę. Ściśnij płytkę na grzbiecie nosa. Wygładź maskę na twarzy. Przełóż taśmy przez głowę. W przypadku zasysania powietrza maskę należy ponownie założyć i dopasować do twarzy. Po założeniu półmaski należy dopasować napięcie pasków do indywidualnych wymiarów poprzez zawiązanie węzła.

Przeciwwskazania do użytkowania maski ochronnej:

- zawartość tlenu w powietrzu jest mniejsza niż 17%;
- posiada otwory przelotowe;

Maskę należy wymienić w przypadku silnego oporu oddechowego.

Przechowywanie i utylizacja:

Przechowywać w opakowaniu producenta. Podczas przechowywania unikać bezpośredniego światła słonecznego, oparów rozpuszczalników organicznych i smarów. Temperatura -30C / + 50C, wilgotność <80%. Zużyte maski ochronne należy utylizować zgodnie z DSanPIN 2.2.7.029